



PL

## Clean Active Premium XXL:

**NOWOŚĆ!** Z hialuronianem sodu. Ten polimer o wyjątkowo lepko-sprężystych właściwościach poprawia nawilżanie i bio-tolerancję soczewek. Dzięki właściwościom wiązania wody - waterlock, płyn wielofunkcyjny Clean Active Premium XXL nawilża soczewki zarówno bezpośrednio po ich zastosowaniu, jak i podczas noszenia przez cały dzień, zwiększając komfort, zmniejszając suchość oczu i podrażnienia. Pełną bio-kompatybilność płynu Clean Active Premium XXL z tkankami oczu i płynami organicznymi zapewniły dodatkowo przeprowadzone badania nad poziomem pH i osmolarnością. Produkcja sterylna.

**Skład:** PHMB, Polyquaternium, Hyaluronate.

### Instrukcja:

Przed zdejmowaniem soczewek z oczu lub wyjęciem z pojemnika należy starannie umyć ręce. Aby uniknąć pomyłek, zawsze zaczynaj od tej samej soczewki. Umieść soczewkę na dłoni. Następnie upuść na soczewkę kilka kropli wielofunkcyjnego płynu do soczewek Clean Active Premium XXL i pocieraj delikatnie jej powierzchnię przez około 10-15 sekund. Oplucz starannie soczewki płynem i umieść je w pojemniczku. Powtórz te same czynności z drugą soczewką. Napelnij pojemniczki płynem wielofunkcyjnym Clean Active Premium XXL i pozostaw soczewki w pojemniczkach z płynem na co najmniej 6 godzin. Wyjmij soczewki z pojemnika po zakończeniu cyklu ich dezynfekcji, oplucz je roztworem Clean Active Premium XXL i załóż soczewki na oczy. Oplucz pojemnik na soczewki płynem Clean Active Premium XXL.

**DYSTRYBUTOR**

**KODANO S.A.**

ul. Samozwaniec 39, 31-711 Kraków, Polska

tel: (+48 12) 371 10 41,

kontakt@kodano.pl, www.kodano.pl



**Barnaux Healthcare B.V.**

NI-5406 XP UDEN, HOLANDIA CE 0344